

Этапы проведения процедуры вытяжения позвоночника в ванне «Атланта»

1. Оденьте на пациента корсеты и уложите его на подъемник



2. Подкатите подъемник с пациентом к ванне



3. Закрепите верхний корсет



4. Закрепите нижний корсет




5. Крепление нижнего корсета



6. Опустите пациента на комфортную глубину



Сила вытяжения задается на сенсорном дисплее, расположенном на панели управления ванны

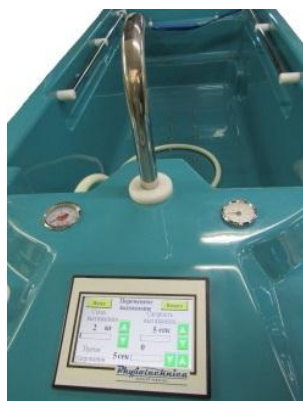

После проведения процедуры переместите пациента на кушетку с помощью подъемника, где он должен находиться до 30 минут.